



A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION

Veillez suivre les recommandations suivantes afin de réaliser le prélèvement et poser les boucles de façon optimale.

Boucles de naissance N98 ou N10 avec biopsie auriculaire



2- Préparation de la boucle de prélèvement :



Toutes les pièces sont marquées au même numéro et présentées ensemble sur la barrette. **NE PAS LES DISSOCIER.**

2.1 Mise en place de la pièce mâle ① :



Appuyer sur le verrou situé sur le côté de la pince. Insérer la pièce mâle ① jusqu'en butée et relâcher le verrou. La pièce mâle est en place.

2.2 Mise en place de la pièce femelle ② :



Appuyer sur la pédale. Insérer la pièce femelle ② jusqu'en butée. Puis relâcher la pédale. La pièce femelle est en place.

Ne pas retirer le capuchon vert, ni le détériorer avant la pose. Il doit rester intègre en position plane pour réussir la pose et le prélèvement. Ne pas l'enfoncer à l'intérieur de la tête femelle en réalisant l'approche des deux pièces mâle et femelle pour vérifier l'alignement avant pose, si vous avez bien placé la pièce femelle en butée au bout de l'adaptateur/pédale, les pièces seront forcément alignées.



1- Contenu de la commande :

- A chaque paire de boucles de naissance, peuvent être associés :
 - 1 enveloppe pré affranchie,
 - 1 sachet mini-grip,
 - 1 étiquette adresse laboratoire,
 - Selon le département : 1 étiquette échantillon



Utiliser la pince spécifique pour poser l'ULTRA Flex TST : Pince PRELEVEMENT TST jaune/noire (réf. 660 00 320)

3- Mise en place de la boucle et prélèvement :

Contentionner l'animal et attendre qu'il se soit calmé. L'animal ne doit pas bouger pendant la pose et le prélèvement.



La réussite de la pose et du prélèvement en dépendent.

La boucle ULTRA Flex TST doit être posée sur l'oreille droite.

Positionner la boucle entre les 2 nervures (représentées par les traits blancs), à un tiers de distance de la tête (cible jaune)



La partie femelle ② est placée à l'intérieur de l'oreille.



Serrer fermement, rapidement et jusqu'en butée complète la pince. Vous entendez l'encliquetage. Ouvrir la pince immédiatement après l'encliquetage.

Après la pose, pour vérifier la bonne tenue de la boucle, tenez chaque pièce avec une main et réalisez des rotations inversées entre ces deux pièces : cela vous permet de vérifier qu'elles sont bien encliquetées ensemble.



La boucle ULTRA Flex TST est posée définitivement à l'oreille, elle est reconnaissable à sa tête blanche.

L'aiguille de prélèvement reste sur la pince.



Vérification de la présence du prélèvement



Témoin vert ou couleur plus ou moins blanche
= Prise d'échantillon réussie

Témoin rose
= Aiguille vide

4- Fermeture du tube sur l'aiguille et retrait de l'ensemble de la pince :



4.1 Placer le tube
③ dans le logement
prévu à cet effet
dans l'adaptateur



4.2 Fermer la pince délicatement pour encliqueter l'aiguille sur le tube, tout en vérifiant leur bon alignement et en les guidant si nécessaire pour ne pas les endommager. Un léger clic retentit, le tube doit être positionné en butée contre la tête d'aiguille. Puis ré-ouvrir les poignées de la pince.



4.3 Appuyer sur le verrou situé sur le côté de la pince et retirer l'ensemble aiguille + tube de la pince.



5- Envoi de l'échantillon au laboratoire :

5.1 Coller l'étiquette-adresse du laboratoire dans le cadre réservé sur l'enveloppe préaffranchie fournie.



5.2 Indiquer la date de prélèvement sur l'enveloppe ou sinon sur l'étiquette échantillon pour les départements où elle est présente.



5.3 Insérer l'ensemble aiguille + tube dans le sachet mini-grip fourni (+ ajouter l'étiquette échantillon si elle est présente).



5.4 Fermer le sachet mini-grip, et le glisser dans l'enveloppe d'expédition.

5.5 Expédier le tout par La Poste.



NB: L'échantillon doit être expédié le jour même, ou conservé au réfrigérateur pour être expédié dans les 48 heures au laboratoire.

Notice de pose ULTRA Flex TST FR16

6- Mise en place de la boucle conventionnelle :

La même pince permet de poser la 2nde boucle conventionnelle. Détacher le kit pointeau situé dans le manche de la pince. Appuyer sur le verrou situé sur le côté de la pince et insérer le kit pointeau, puis relâcher le verrou.



Mise en place des pièces mâle et femelle :



Placer la boucle mâle sur le pointeau.

Insérer la boucle femelle sous la pédale.



Pour poser une boucle électronique, nous conseillons fortement d'utiliser la pince TTU rouge sans adaptateur (réf. 66000144).

Si vous utilisez la pince prélèvement TST jaune/noir, il faut au préalable avoir retiré l'adaptateur plastique orange, afin de pouvoir glisser la partie renflée de ce type de boucle contenant le transpondeur.



S'assurer que la partie mâle et la partie femelle sont bien alignées.

La boucle ULTRA ou SELECT-ULTRA doit être posée sur l'oreille gauche.

Positionner la boucle entre les deux nervures, à un tiers de distance de la tête (cible jaune).



La partie femelle est placée à l'intérieur de l'oreille. Serrer fermement la pince. Vous entendez l'encliquetage. Ouvrir la pince immédiatement après.



La boucle ULTRA est posée fermement à l'oreille. Elle est reconnaissable à sa tête noire.

Terminer la pose en lui faisant faire un quart de tour dans un sens puis dans l'autre afin de bien couper les chairs.




Après la pose, surveiller la cicatrisation et désinfecter si nécessaire.

Notice complémentaire boucle ULTRA Flex-TST (FR16)

A FAIRE / A PROSCRIRE



Attention, ne pas endommager le capuchon vert

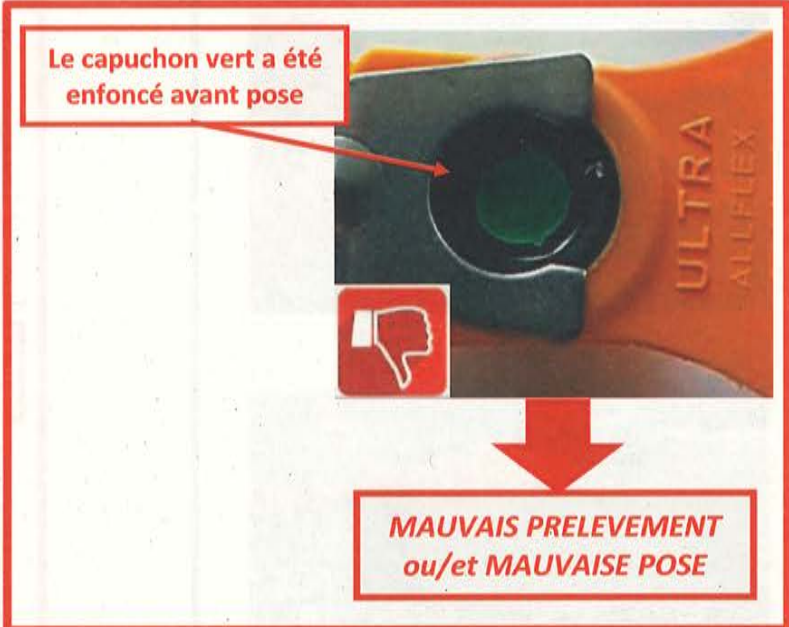

*Attention, la contention de l'animal est primordiale
L'animal ne doit pas bouger pendant le prélèvement et la pose*



Bloquez le veau, attachez-le, faites-vous aider, ...





**SI PAS DE CONTENTION,
DE TENUE / MAINTIEN DE L'ANIMAL
=> MAUVAIS PRELEVEMENT
ou/et MAUVAISE POSE**

Notice complémentaire boucle ULTRA Flex-TST (FR16)

A FAIRE / A PROSCRIRE



Attention, la position de la boucle dans la pince est primordiale

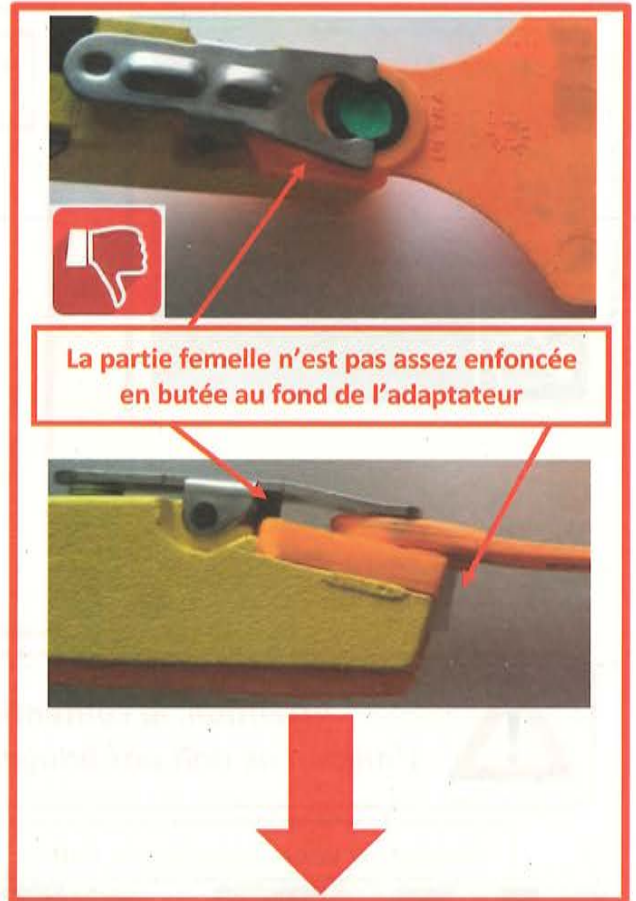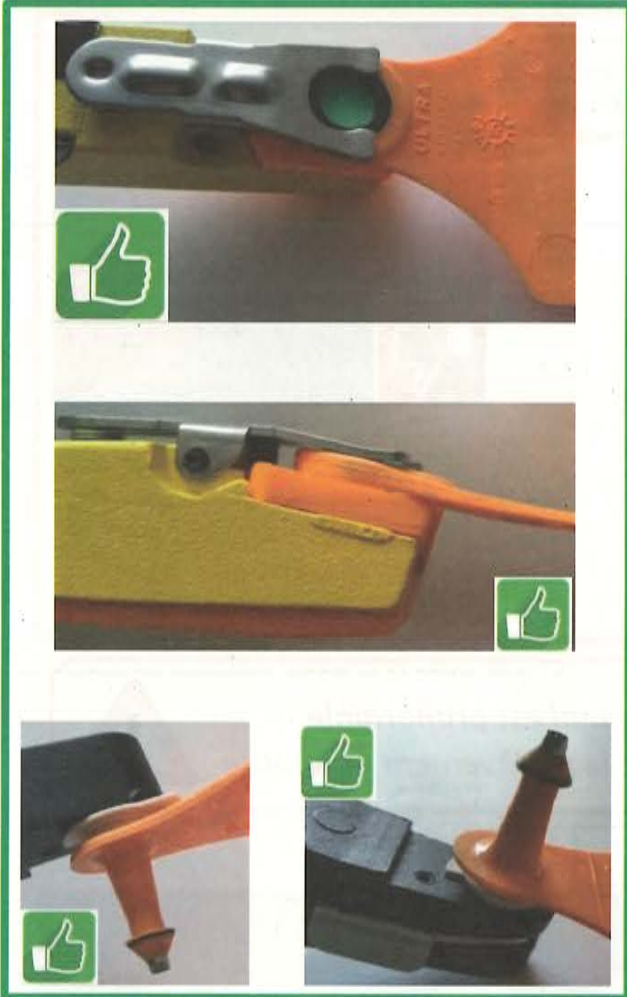

CASSE, TORSION, RECU de l'aiguille
=> MAUVAIS PRELEVEMENT
ou/et MAUVAISE POSE